

院長、
5枚入りが
新発売です。

出血が止まらなくて困ったことはありませんか？

5枚入り
来たね！

天然
アルギン酸カルシウム使用
海藻

ワルファリン系、アスピリン系の抗凝固薬剤を投与中の患者様にもご使用になれます。

口腔外科をはじめ、心臓カテーテル治療や脳血管内手術時の経皮的穿刺部止血など、幅広く使用されています。

止血 TODENT ノパッド

■天然海藻が「安全で迅速な止血」を可能にします。


「トーデント止血パッド」は、国内臨床現場の声をもとに開発されました。安全性の高い天然海藻（ジャイアントケルプ）から抽出したアルギン酸カルシウムを線維化し、プレスして固めた歯科医療用不織布です。ヒト血液の凝固因子のひとつであるカルシウム（Ca⁺⁺）をパッドから放出する事で出血部の血液凝固反応が活性化されます。



■ヒト血液凝固カスケードで働くカルシウムイオンが開発のヒントです。



■ヒト本来の血液凝固において重要な因子のひとつがカルシウムです。

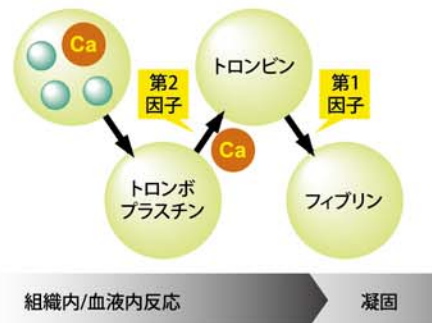

【製品仕様】

●原材料：アルギン酸カルシウム(天然海藻由来) ●サイズ：10x25mm ●入数：20枚/箱、5枚/箱 ●滅菌：ガンマ線

【ご使用方法】

●出血部位に直接触れることができる場合は、パッドを乾燥状態のままであげ軽く圧迫を加えてください。●出血部位が直視できないような場合は事前にパッドに生食を付与し(1cc程度以上)出血部近位にあてがい、軽く圧迫を加えてください。溶出したCa⁺⁺が生食と共に深部まで浸潤していきます。

【ご使用上の注意】

●止血の際は、必ずパッドと出血部位を圧迫保持してください。圧迫の強さ、保持時間は出血の程度や患者さまの条件により異なりますので、適宜止血状況を確認しながらご使用ください。●止血完了後は必ずパッドを取り出し廃棄してください。●万一長時間にわたりパッドを口腔内に留置した場合、パッドと出血部の固着が懸念されるため、パッドを取り出す際には事前にパッドに水をかけパッドを十分湿らせてからゆっくり取り出してください。

標準価格

【20枚入】 16,400円(税別)
【5枚入】 4,570円(税別)

販売名：トーデント止血パッド 型番：T108001
分類：一般医療機器 滅菌済/再使用禁止
一般的名称：医療用不織布 届出番号：13B3X00533000008
製造販売元：アライアンス・メディカル・グループ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷5-24-3