



天然海藻

アルギン酸カルシウムを使用しています。

天然海藻(ジャイアントケルプ)から

抽出したアルギン酸カルシウムを線維化し、
プレスして固めた歯科医療用不織布です。

口腔外科をはじめ、心臓カテーテル治療や
脳血管内手術時の経皮的穿刺部止血など、
幅広く使用されています。

止血 TODENT ノパッド

20枚入りと5枚入りの2種類からお選びいただけます。

標準価格：【20枚入】16,400円(税別) 【5枚入】4,570円(税別)

【ご使用方法】

- 出血部位に直接触れることができる場合は、パッドを乾燥状態のままあてがい軽く圧迫を加えてください。
- 出血部位が直視できないような場合は、事前にパッドに生食を付与し(1cc程度以上)出血部近位にあてがい、軽く圧迫を加えてください。
- 止血後は必ずパッドを取り出し、廃棄してください。

【製品仕様】

- 原材料：アルギン酸カルシウム
(天然海藻由来)
- サイズ：10x25mm
- 入数：20枚/箱、5枚/箱
- 滅菌：ガンマ線

販売名：トードント止血パッド
型番：T108001
分類：一般医療機器 滅菌済/再使用禁止
一般的名称：医療用不織布
届出番号：13B3X00533000008
製造販売元：アライアンス・メディカル・グループ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-13