



基本性能を重視した【ポーセレンファーンネス】

FIRELITE

ファイアーライト

機能と価格はそのまま。デザインが新しくなりました。

標準価格 498,000円 (税別)

ポンプ付属

製品名:ファイアーライト 分類:一般医療機器 医療機器届出番号:13B1X00004000032 一般的名称:歯科技工用ポーセレン焼成炉 製造元:ウィップミックス社(米国)

基本性能を重視した開発によって、シンプルな操作性とお求めやすい価格を実現しました。

■ 便利なプログラム設定

50種類の焼成プログラムが設定可能です。プログラムはタッチキーにより簡単に変更できます。

また、プログラム進行中も、設定の変更・スキップを行うことが可能です。

■ 温度管理に優れています。

イントラサーモ型プラチナ熱伝対の採用と独自の設計により、正確な温度管理が可能です。炉内の温度分布の均一化を計り、熱効率を高めるため、透明な石英ガラスチューブで保護された螺旋状の熱線が等間隔で巻かれています。マッフルの湿気を防ぐナイトモード機能を装備しています。


■ シンプルなコントロールパネル

デジタル表示のディスプレイにはプログラムナンバー、温度、時間が表示され、実行中のプログラムの進行状況はLEDグラフで表示されます。シンプルなコントロールパネルが視覚的に分かりやすく状況を伝えます。

■ 真空急冷機能を搭載

プログラム終了後の最終温度が、これから開始するプログラムの開始温度より高い場合に、真空ポンプにより開始温度までマッフルを自動冷却する機能です。

■ プログラム設定範囲

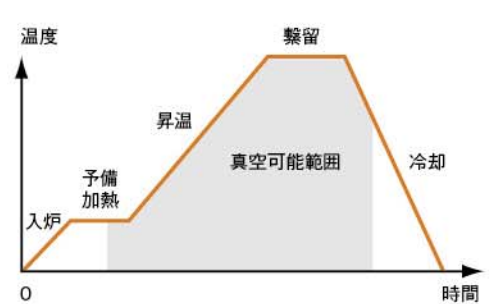

スタート温度の設定範囲	0~650℃
予備乾燥時間の設定範囲	0~60分
予備加熱時間の設定範囲	0~60分
保温時間の設定範囲	0~60分
冷却時間の設定範囲	0~60分

【仕様】 寸法: 幅 34.3 x 奥行 34.3 x 高さ 52.1 (cm) 重量: 22.7 kg 最高温度: 1,200 ℃

【電気的定格】 電源: AC100V 50/60Hz 消費電力: 1,200W(ファーンネス単体/真空ポンプ使用時)

電撃に対する保護の形式: クラスI機器 ※マッフルおよび熱電対を含むファーンネス全体の保証期間は1年間です。

製品の詳細、弊社最新情報をインターネット上でご覧下さい。▶▶ www.tokyodental.co.jp

東京歯科産業

検索

製造販売元

東京歯科産業株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254
E-mail:main@tokyodental.co.jp
http://www.tokyodental.co.jp

■大阪支店 〒541-0059 大阪市中央区博労町4丁目4-11
船場西KIDビル2階 TEL:06-6251-5624
■九州支店 〒812-0028 福岡市博多区須崎町4-23
TEL:092-281-5625